

000/0070.020/20



Ycla Spray, vaporisateur rince-oeil et plaies (50ml)

Ycla Spray, spray lave-oeil et nettoyant plaies pour soins rapides, efficaces et doux en cas de lésions superficielles de la peau ou d'intrusion d'impuretés et de poussières dans l'oeil. Il permet de réduire au maximum les risques d'infection. Contient 0.9% chlorure de sodium.

Propriétés

- Contenu: 50 ml.
- Offre un rinçage sain, précis et efficace.
- Utilisation rapide et facile d'une seule main.
- Hypoallergénique et sans conservateurs.
- Ne pique pas.
- Son jet régulier est à la fois suffisamment vigoureux pour nettoyer une plaie en évacuant les particules indésirables et suffisamment léger pour rincer l'oeil en douceur.
- Système "bag-in-can": le liquide contenu dans le vaporisateur est conservé dans une poche interne complètement séparée du gaz propulseur.
- La poche est directement soudée à la valve de pulvérisation, ce qui empêche le gaz propulseur de s'échapper du flacon.
- Temps de pulvérisation: ?15 min.
- Le flacon vaporise dans toutes les positions, même tête en bas.

Applications

vaporisateur rince-oeil et plaies pour évacuer les particules étrangères

Utilisation

- Nettoyer l'embout de vaporisation avant usage en vaporisant brièvement en l'air. Placer l'embout à environ 10 cm de la plaie et de l'oeil.
- Appuyer et pulvériser sur la plaie ou l'oeil.
- Eviter tout contact direct avec l'embout.

Contenu

- Flacon.

Préservation

- Conserver à température ambiante (10°C-30°C).
- Date d'expiration: 3 ans à partir de la date de fabrication.

Ycla Spray est un dispositif médical.

Version: 28/04/2024