

000/0080.041/20



Contusio Duopatch

Le pansement chauffant Contusio Duopatch est utile pour soulager les muscles tendus, les fatigues, l'arthrite et les douleurs menstruelles, en apportant une chaleur agréable et bien tolérée pendant une période d'environ 8 heures. Contusio Duopatch a été testé dermatologiquement et se porte discrètement sous les vêtements.

Avec 2 zones de chaleur, chauffe mieux.




Propriétés

- Effets bénéfiques de la chaleur: stimule la circulation sanguine. La chaleur améliore l'afflux de sang en dilatant les vaisseaux sanguins. S'ensuit une augmentation de l'apport d'oxygène et de nutriments vitaux aux cellules du tissu musculaire.
- Améliore l'élimination des produits métaboliques secondaires: les déchets produits par les tissus cellulaires et par les muscles sont éliminés plus facilement grâce à une meilleure circulation sanguine.
- Soulage la douleur: la chaleur réduit la tension, détend et améliore la mobilité

Utilisation

- Nettoyer et essuyer soigneusement la zone concernée.
- Extraire le patch de son sachet et retirer la pellicule protectrice.
- Placer le patch sur la zone douloureuse en faisant attention qu'il adhère bien à la peau sur toute sa surface. (Cela peut durer environ 30 minutes avant d'atteindre la température prévue).
- Porter le produit pendant au moins 8 h.
- Le patch ne peut pas s'enrouler sur lui-même (par exemple autour du poignet).

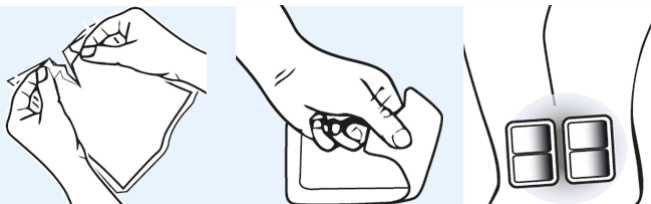

Contenu

Boîte 6 pièces

Préservation

- 60 mois après la date de production,
- produit individuel: voir emballage.

A conserver dans un emballage fermé et dans un endroit sec, loin des rayons de soleil directs.

Contusio Duopatch est un dispositif médical.

Version: 05/05/2024