

000/0020.114/30



Duoskin+ bleu, pansement imperméable et métallique détectable

Duoskin+ bleu metaldetectable est un pansement imperméable bleu qui contient une feuille d'aluminium sous la compresse antiadhérente.



Propriétés

- Dimensions: 6 x 8 cm.
- Absorbant, compresse antiadhérente.
- Résiste à l'eau et aux bactéries.
- Laisse respirer la peau.
- Film bleu.
- Emballé individuellement.
- Détectable à l'aide d'un appareil de détection professionnel grâce à la présence d'une feuille d'aluminium sous la compresse.

Applications

- Coupures et écorchures superficielles.
- Ne convient pas pour les plaies profondes, infectées ou saignant fortement.
- Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire.
- Usage unique.

Utilisation

Application du pansement

- Nettoyer la plaie soigneusement.
- Ouvrir l'emballage.
- Enlever l'ailette de protection '1'.
- Appliquer sur peau sèche sans toucher la compresse.
- Enlever l'ailette de protection '2'.
- Exercer une légère pression sur toute la surface afin de faire adhérer le pansement.
Enlever l'ailette de protection '3'.
- Serrer fermement autour de la blessure.

Retrait du pansement

On peut enlever le pansement en détachant un coin. Ensuite, retirer le pansement parallèlement à la peau.



Contenu

Boîte 30 pièces

Préservation

- Date d'expiration: 59 mois après la date de production.
- A conserver à température ambiante (entre 10 et 25°C) et dans un endroit sec et sombre.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 05/05/2024