



000/5160.404/30

Masque antipoussière FFP2 Mumu - 10pc (BLANC)

Le masque antipoussière FFP2 NR protège le porteur et son environnement contre l'inhalation des plus petites particules et gouttelettes en suspension dans l'air.

Propriétés

- Couleur: blanc
- Masque à poussière plié, avec 2 fixations auriculaires élastiques
- Marquage CE conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
- Classification FFP2 NR selon la norme d'essai EN 149:2001+A1:2009
- Marquage CE sous numéro 2841, marque Mumu
- 5 couches
- Ajustable au niveau du nez afin d'assurer un ajustement parfait
- Emballage individuel

Applications

- Masque à usage unique
- Le masque doit être jeté après chaque journée de travail (max. 8h) / s'il est mouillé ou endommagé

Utilisation

4 étapes:

1. Retirez le masque après que vous avez nettoyé les mains et en vous assurant que l'emballage n'est pas endommagé.
2. Tenez le masque devant votre visage et assurez-vous qu'il couvre votre bouche et votre nez. Ensuite, placez les fixations auriculaires derrière vos oreilles.
3. Utilisez vos mains pour ajuster soigneusement le pince-nez à la forme de votre nez.
4. Testez l'ajustement. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart autour du nez ou au bord du masque afin de garantir un ajustement correct.



Contenu

10 pièces/boîte, emballage individuel

Préservation

Expiration: 3 ans après la date de fabrication si le produit est stocké correctement et dans un emballage fermé

Produit individuel: voir emballage

Conserver dans un endroit frais, à une température entre -20 et 30 °C. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.

Marquage CE 2841 selon (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI), conformément à la norme EN 149:2001+A1:2009

Version: 02/05/2024