



000/5170.212/30

Tensiomètre bras Omron M3 Comfort

Précis, fiable et pratique

L'OMRON M3 Comfort est un tensiomètre compact et facile d'utilisation qui mesure la pression artérielle et la fréquence du pouls, simplement et rapidement. Pour un gonflage contrôlé confortable, sans pré-réglage de la pression ou regonflage, l'appareil fait appel à une technologie avancée: "IntelliSense".

Propriétés

- Le tensiomètre est pourvu d'un affichage numérique LCD très clair et est facile à utiliser.
- Le brassard Intelli Wrap indique l'installation correcte autour du bras, grâce à sa zone de contact plus grande qu'avec un brassard standard.
- Grâce à la technologie *Intellisense* la mesure se passe confortablement, sans tension forte désagréable.
- Détection automatique des mouvements excessifs pendant la mesure.
- Se gonfle et se dégonfle automatiquement.
- Circonférence mesurable du bras: 22 - 42 cm
- Poids:
 - tensiomètre: environ 337 g (sans piles)
 - brassard: environ 163 g
- Capacité de mémoire: 2 utilisateurs x 60 enregistrements

- Plage de pression du brassard: 0 à 299 mmHg
- Plage de mesure:
 - Pression artérielle: SYS 60 à 260 mmHg / DIA 40 à 215 mmHg
(précision: ± 3 mmHg)
 - Pouls: 40 à 180 pulsations/minute
(précision: $\pm 5\%$ du relevé affiché)
- Garantie: 3 ans à compter de la date d'achat (pas pour le brassard).

Applications

- Détection des battements irréguliers du cœur
- Indication du niveau de tension artérielle

Utilisation

Voir mode d'emploi.

Remarques & conseils

- N'utiliser ce tensiomètre que sur des patients adultes. NE PAS utiliser ce tensiomètre sur des nourrissons, des tout-petits, des enfants ou des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer.
- N'utiliser le brassard QUE sur des personnes dont la circonférence du bras se situe dans la plage spécifiée du brassard.
- La pression artérielle peut être différente entre le bras droit et le bras gauche et les valeurs mesurées de la pression artérielle peuvent également être différentes. Utiliser donc toujours le même bras pour la mesure.
- Se reposer au moins 5 minutes avant la mesure.
- Retirer les vêtements serrés ou épais et tout accessoire du bras lors d'une prise de mesure.
- Rester immobile et NE PAS parler pendant la prise de mesure.

Contenu

- tensiomètre
- brassard
- 4 piles "AA"
- étui de rangement
- mode d'emploi

Préservation

- Conserver le tensiomètre dans son étui de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas ranger le tensiomètre dans des endroits exposés aux températures extrêmes, à l'humidité ou à l'ensoleillement direct.

Ce dispositif médical a été validé cliniquement au sein de la population générale.

Version: 28/04/2024