

000/0010.028/30



ECV5 bleu, pansement élastique cohésif (0,05x4m)

ECV est un pansement de soutien et de fixation qui satisfait à de nombreuses exigences. Le pansement ne se déplace pas et assure une fixation réelle tout en maintenant la mobilité du patient au maximum.



Propriétés

- Pansement élastique en rouleau, déchirable à la main.
- Couleur: bleu.
- Autoadhésif. Ne colle pas à la peau, ni aux vêtements ou aux poils.
- Elasticité élevée: garantit une mobilité optimale lors de l'usage.
- Aéré.
- Dimensions: 0,05 x 4m.

Applications

- Pansement de soutien pour les doigts, bras, pieds etc.
- Utilisable pour fixer/couvrir pansements et compresses.
- Usage unique.

Grâce aux caractéristiques cohésives du ECV, les enroulements ne doivent se recouvrir que d'un tiers. Ainsi on épargne du matériel et du temps, ceci contrairement aux bandages classiques. Le pansement ne forme pas de plis et ne gêne pas les mouvements.

ECV assure une pression constante et réglable.

Utilisation

- Utiliser l'élasticité avec modération, car une tension trop excessive pourrait gêner la circulation sanguine.
- Afin d'appliquer le bandage d'une manière correcte, le gaufrage doit toujours rester apparent. Dérouler le bandage en recouvrant chaque tour d'au moins un tiers du tour précédent.
- Le dernier tour ne doit pas être en contact avec la peau mais doit complètement recouvrir le tour précédent.
- Remplacer le pansement quand il est mouillé.



Contenu

- 2x boîte de 4 pièces

Préservation

- Date d'expiration: 60 mois après la date de production.
- A conserver dans un emballage fermé à température ambiante (entre 10 et 25°C), loin des rayons de soleil directs, dans un endroit sec et frais.

Ce produit est un dispositif médical de classe I portant le marquage CE.

Version: 10/05/2024