

000/0130.011/30

Noseblot, tigarette absorbante en cas de saignements de nez



100% sûr et pur

en vente exclusivement chez MExT

Noseblot est une éponge expansible pour traiter les saignements de nez. Noseblot, tigarette nasale, s'adapte parfaitement à la forme de la cavité nasale et ne risque pas de tomber du nez.



Propriétés

- Noseblot devient mou et se dilate lorsqu'il entre en contact avec le sang. La tigarette exerce une légère pression dans la cavité nasale, ce qui permet d'arrêter le saignement.
- L'absorption commence en 0-2 secondes.
- Expansion de 100% en 7 secondes à 37°C.
- N'adhère pas aux parois nasales: facile à retirer (réduit le risque de nouveaux saignements).
- Le Noseblot a une structure spongieuse et poreuse et est exempt de fibres ; risque d'allergies extrêmement faible.
- Biodégradable.

- Les tigettes sont emballées individuellement et stérilement dans des sachets en aluminium.
- Dimensions: 4,5 x 2 cm.

Applications

Traitement de l'épistaxis (saignements de nez)

Utilisation

- Se laver les mains avant de retirer la tigette nasale de son emballage.
- Insérer avec précaution le Noseblot dans la cavité nasale. Ne pas pousser le Noseblot trop loin, en veillant toujours à ce qu'au moins 1 cm de la tigette reste à l'extérieur du nez.
- Laisser la tigette nasale en place aussi longtemps que le saignement persiste, généralement entre 10 et 15 minutes.
- Retirer avec précaution la tigette. Si le saignement n'a pas cessé, répéter le traitement avec un nouveau Noseblot. Si le saignement n'a pas cessé après le deuxième traitement, consulter un médecin.



Contenu

boîte 3 pièces

Préservation

- Conserver au sec.
- Conserver à une température entre 5 et 35°C.
- Protéger contre la lumière solaire et la chaleur.
- Usage unique.
- Date d'expiration: 5 ans après la date de production.

Ce produit est un dispositif médical stérile de classe I, homologué CE 1639 sous MDR.

Version: 19/05/2024