

000/2100.010/00



Set d'attelles vacuüm - 3 pièces

Le set d'attelles vacuüm offre une solution confortable pour presque tous les types de fracture ou d'entorse des épaules ou des mains, même complexes.

Propriétés

- Large : 102 x 76 x 2,5 cm.
- Medium : 70 x 51 x 2,5 cm.
- Small : 50 x 33 x 2,5 cm.
- Rangé : 61 x 28 x 28 cm.
- Poids : 2,9 kg.
- Température : -34°C à 82°C.
- Prend la forme du membre fracturé ou luxé.
- Isolation thermique.
- Résistant à l'eau.
- Radiotransparent.
- Sangles Velcro.
- Immobilise en 30 secondes.
- Pompe : système Easy-click.
- 1 an de garantie.
- CE approuvé.
- NSN (approuvé par le US Defence Medical Standardization Board).

Utilisation

- Répartir les microbilles sur la totalité de l'attelle.
- Envelopper le membre luxé ou fracturé avec l'attelle.
- Fermer les sangles.
- Attacher la pompe à l'attelle.
- Insuffler l'air dans l'attelle (+/- 20 secondes) jusqu'à ce que cette dernière durcisse. Fixer fermement les sangles.
- Pour relâcher : Détacher les sangles.
- Pousser sur la valve (+/- 10 secondes) jusqu'à ce que l'attelle redevienne souple.
-

Contenu

- Set de 3 pièces.

Préservation

- Se conserve pendant 10 ans.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Le set d'attelles vacuüm est composé de dispositifs médicaux.

Version: 27/04/2024

