

000/2100.101/00



Stifneck - 4 dans 1


Le Stifneck Select est une solution assez simple pour immobiliser temporairement le cou d'un patient qui risque d'avoir une fracture des vertèbres cervicales. Le Stifneck select peut être utilisé pour n'importe quel type de cou (pas de cou, court, long, standard).

Propriétés

- Dimensions: 55 x 15 cm.
- Plastique PVC.
- Couche en mousse absorbant les chocs.
- Fermetures Velcro.

Utilisation

- Placer la tête en position neutre et mesurer la distance entre l'épaule et le menton.
- Régler le soutien du menton à la taille sélectionnée.
- Emboîter les deux côtés en appuyant sur les deux languettes de verrouillage.
- Mettre en forme la minerve.
- Placer le soutien du menton complètement sous ce dernier selon les images d'instruction.
- Conduire le patient à l'hôpital ou appeler les instances compétentes.

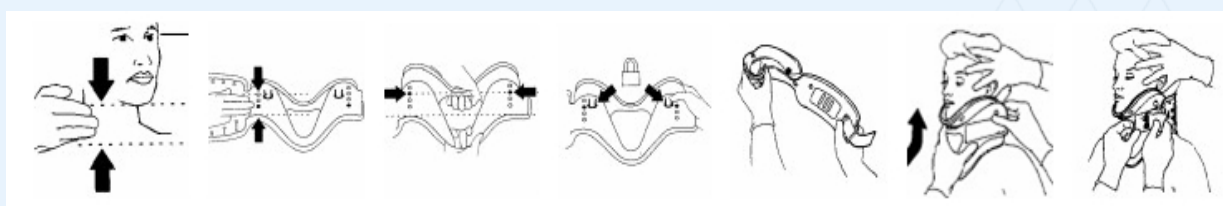

Contenu

- Pièce.

Préservation

- A n'utiliser que sur un seul patient.

Le Stifneck Select est un dispositif médical.

Version: 25/06/2026

