

000/0010.022/20



ECV10, pansement élastique cohésif

ECV est un pansement de soutien et de fixation, qui satisfait à de nombreuses exigences. Le pansement donne une fixation réelle sans se déplacer et empêche les mouvements du patient au minimum. Grâce à son pourcentage élevé de coton.



Propriétés

Dimensions: 0.10 x 4 m. Résistant à la poussière, à l'eau, à la graisse et à l'huile. Ne colle ni à la peau, ni à la blessure ni aux poils. Peut être réutilisé. Peut être lavé 1 à 2 fois à 40°C sans détergent et sans chlore. Rincer et laisser sécher à plat. Se découpe sans ciseaux. Est perméable à l'air. Longueur étirée: 4m.

Applications

Fixation de pansements de toutes sortes et tailles. Bandage de fixation avec action de soutien. Bandage pour le doigt, le poignet, la tête et l'oreille. Sous- bandage qui protège la peau en cas de pansement préventif. En cas de thermothérapie, utilisez le bandage comme sous- bandage afin de fixer le coldpack.

Utilisation

Utilisez l'élasticité du ECV modérément, car une tension trop excessive pourrait gêner la circulation sanguine. Afin d'appliquer le bandage d'une manière correcte, le gaufrage doit toujours rester apparent. Continuez de panser, en couvrant avec chaque tour au moins la moitié du précédent. Le dernier tour doit recouvrir complètement le tour précédent et doit être posé sans pression.



Contenu

Boîte 2 pièces.

Préservation

ECV est emballé sous cellophane UV. Date d'expiration (si le produit est conservé dans des conditions optimales): 60 mois après la date de production, produit individuel : voir emballage. Conservez-le dans un emballage fermé sous température ambiante, loin des rayons de soleil directs.

ECV est un produit dispositif médical.

Version: 20/01/2022