


000/5160.405/30

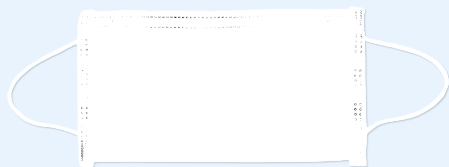

Masque facial 3 couches, non-woven (sachet scellé 2pc)

Masque chirurgical jetable à fixation auriculaire élastique, 3 couches, avec pince-nez réglable.

Propriétés

- Dispositif médical, classe I
- CE conforme à la norme EN14683:2019+AC:2019. Pas de difficultés de respiration.
- Masque chirurgical type IIR, efficacité de filtration bactérienne $\geq 98\%$
- Dimensions: 17,5 x 9,5 cm
- Hypoallergénique
- Sans fibres de verre

Applications

- Masque jetable, usage unique.
- Remplacer le masque: après max. 4 heures/quand humide ou sale.

Utilisation

- Nettoyez-vous les mains avec du savon et de l'eau.
- Prenez le masque en ne touchant que les élastiques et tournez-le dans la bonne direction: la partie du haut est celle avec la barrette nasale.
- Assurez-vous que le côté blanc est tourné vers votre visage. Le côté bleu est l'extérieur du masque.
- Évitez de toucher l'intérieur du masque.
- Tirez légèrement le masque pour couvrir le nez et le menton.
- Ajustez la bande pour le nez en utilisant votre index et votre pouce pour pincer la partie rigide en haut du masque et la mouler autour de l'arête du nez.

Contenu

2 masques/sachet

Préservation

- A conserver à température ambiante.
- Date d'expiration: 60 mois après la date de fabrication sous circonstances normales et à

condition que l'emballage soit bien fermé.

Ce produit est un dispositif médical, classe 1, non stérile

Version: 15/04/2026

